

Klinik-Flaschenwärmer

Quick-Start-Guide



Kein Wasser einfüllen!



Flasche hineinstellen.



Abdeckung auf Gerät setzen.



Taste berühren, bis die Ecke blau leuchtet. In der Erwärmungsphase gehen die Lampen im Gerät mehrfach an und aus.




Bei erreichter Trinktemperatur leuchtet die Ecke grün.



Bei Bedarf Abdeckung abnehmen und Flasche entnehmen oder weiter im Gerät warm halten (max. 120 Min.).


Optionen

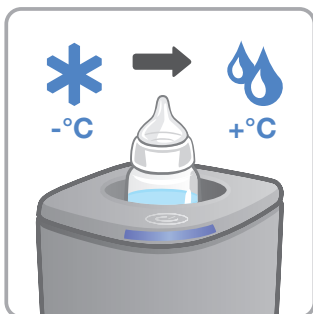

Auftauen: Ein Sensor erkennt, ob der Inhalt der Flasche oder Spritze gefroren ist, und startet automatisch einen schonenden Auftauprozess. Die Ecke leuchtet lila.



Wenn es schnell gehen soll: Taste für 3 Sekunden berühren, um den Boost-Modus zu aktivieren. Lampe leuchtet rot. Zum Ausschalten Taste berühren, bis das rote Licht erlischt.

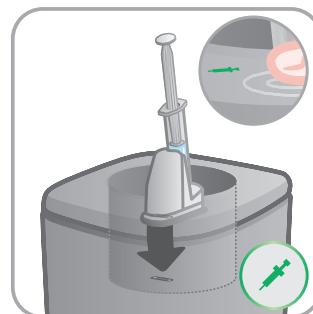

Spritze in Spritzenhalter (separat erhältlich) erwärmen. Kontakte von Halterung und Geräteboden verbinden sich. Lampe leuchtet grün.



Bei rotem Licht ist die Nahrung zu warm. Bei blinkendem roten Licht ist ein Geräte-Fehler vorhanden. Siehe Infos in der Gebrauchsanweisung.



MEDICPRO
MAPA CLINICAL SUPPORT